

Orientações pré-analíticas

Toxicológico do Cabelo

Atenção!

Temos uma nova orientação para a nossa rotina de atendimento do Exame Toxicológico de larga janela de detecção.

Você receberá no seu **KIT** com algumas **etiquetas** que devem ser coladas nos **envelopes de coleta A e B**. Veja como é fácil e rápido esse processo:



- 1 Assim que receber as etiquetas, **não esqueça de colar** as mesmas no envelope de coleta (A e B);
- 2 As etiquetas **não devem cobrir as rubricas**;

- 3 As etiquetas enviadas são **destrutíveis**, então é muito importante certificar-se de que as amostras já tenham sido acondicionadas no envelope antes de lacerar.

Confira o vídeo de orientação:



Identificação da sala de coleta

Acesse o QR code e imprima a identificação, em seguida, fixe-a na sua sala de coleta. Essa é uma ação obrigatória conforme Resolução do Contran nº 923, de 28/03/2022.



Juntos, podemos garantir a segurança e qualidade dos nossos resultados.